

alcotest plus

Características:

Alcotest Plus es un alcoholímetro desechable que consiste en un tubo cilíndrico que contiene una sustancia sensible a la cantidad de alcohol presente en el aire espirado.

Alcotest Plus varía de color dependiendo de la tasa de alcohol detectada, ofreciendo información adicional, tal y como se muestra en la escala.

Modo de empleo

1. Quitar las tapas de seguridad de los extremos del tubo analizador.
2. Colocar la boquilla en el extremo opaco del tubo.
3. Realizar 3 espiraciones de unos 10 segundos cada una.

Esperar aproximadamente 2 minutos. Comparar el resultado con la escala.

Resultados posibles:

Dentro del límite establecido:	Por encima del límite establecido:
0,0 g/l 0,2 g/l	0,5 g/l 0,8 g/l 1,0 g/l

Presentación:

Display

Los alcoholímetros se presentan en bolsitas individuales de autocierre, que se sirven en bolsas de 50 unidades, acompañadas de un display.



Blister

Los alcoholímetros se presentan en blísters de 2 unidades con sistema hung-up.



Autotest de Alcoholemia Desechable

AlcoLimit

Características:

AlcoLimit es un alcoholímetro desechable que consiste en un tubo cilíndrico. La persona que realiza el test de alcoholemia debe soplar durante 20 segundos aproximadamente a través del alcoholímetro para que la sustancia química reaccione con el aire espirado y se obtenga el resultado del test.

La sustancia cambia de color dependiendo de la tasa de alcohol, indicando si se rebasa o no la tasa de alcoholemia permitida para los conductores.

Presentación:

AlcoLimit se presenta en cajas individuales, listas para su comercialización en cajas/display de 48 o 24 uds.



Modo de Empleo:

1. Esperar 15 minutos tras la última ingesta de alcohol.
2. Presionar con el pulgar la parte central del tubo hasta romper la ampolla de vidrio interna.
3. Realizar una espiración continua de unos 12 seg.
4. Agitar el tubo, ponerlo en posición horizontal y esperar 2 minutos.



PHARMAVIDA

Pharmavida Products, S.L. es una empresa de capital íntegramente español que nace para desarrollar productos dedicados a la prevención, la salud y la belleza.

Nuestros productos se caracterizan por su alta calidad y por el prestigio que poseen a nivel internacional.

PHARMAVIDA PRODUCTS. S.L.
Jorge Juan 120 - 2º; 28028 Madrid
info@pharmavida.com B-84010099
Tel:91.504.39.58 - Fax:91.504.39.50

¿Porqué un alcoholímetro desechable?

Desde junio de 2006 el sistema que regula el permiso de conducir será completamente nuevo.

El conductor perderá seis puntos en caso de dar positivo en una prueba de alcoholemia con más de 0,25 mg/l. en aire aspirado.

También serán sancionados los que no se sometan a la prueba de alcoholemia.



Nuestras Marcas:

alcotest plus

AlcoLimit



PHARMAVIDA

alcotest



Características:

Alcotest y RedLine son distintas marcas de un mismo producto.

Este alcoholímetro desechable consta de un pequeño globo que debe ser inflado y un tubo cilíndrico que contiene una sustancia sensible al alcohol presente en el aire espirado. La sustancia cambia de color dependiendo de la tasa de alcohol, indicando si se rebasa o no la tasa de alcohol permitida para conductores.

El uso del globo garantiza la cantidad y presión de aire necesarias para una correcta reacción de la sustancia, proporcionando un resultado 100% fiable.



Modo de empleo:




1. Romper los extremos de plástico del tubo y vaciar los cristales de conservación.
2. Inflar el globo en una sola espiración.
3. Insertar el lado blanco del tubo analizador en el cuello/válvula del globo.
4. Presionar el globo con ambas manos hasta que esté totalmente vacío, haciendo pasar el aire a través del tubo analizador.



Comprobar el resultado entre 1 y 2 minutos después.

Resultado inferior a 0,5 g/l (0,25 mg/l)

Resultado superior a 0,5 g/l (0,25 mg/l)

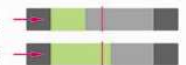

Tanto RedLine como Alcotest cuentan con certificaciones de calidad en 13 países distintos, entre los que destacamos el Informe Técnico del Centro Español de Metrología, perteneciente al Ministerio de Fomento, que avala la precisión del producto tras un estudio de la reactividad de la sustancia sensible al alcohol.

La Policía Francesa utiliza este alcoholímetro para sus controles.

Presentación: Display

Los alcoholímetros se presentan en bolsitas individuales de autocierre o celofán, que se sirven en cajas/display de 20 unidades.



Blister

Los alcoholímetros se presentan en blísters de 2 unidades con sistema hung-up.

